

Semi- Orthopedische schoenen



Bij Leuk Orthopedie kijken wij graag, samen met u, naar de beste oplossing voor uw voetklachten. Onze vakkundige adviseurs kunnen precies zien waarmee u het beste bent geholpen: orthopedische inlays, semi-orthopedische schoenen, orthopedische schoenen of een schoenaanpassing. Uw schoenen kunnen helemaal of gedeeltelijk op maat worden gemaakt. Wij bieden u vakkundig advies, kwaliteit en een goede nazorg. In deze handleiding vindt u informatie over het dragen en onderhouden van orthopedische schoenen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het lichaam moet vaak nog even wennen aan nieuwe orthopedische schoenen. De aanpassingen en de correcties kunnen ervoor zorgen dat staan en lopen anders aanvoelt. Ook de schoenen zelf kunnen in het begin vreemd en stug aanvoelen.

Om te wennen aan de nieuwe schoenen en om drukplekken te voorkomen, moeten de schoenen volgens een schema worden ingelopen. Onderstaand kunt u drie schema's vinden. De draagtijd en dus welks schema voor u het beste werkt kan verschillen en is afhankelijk van de gevoeligheid van uw voeten.

	Schema 1	Schema 2	Schema 3
1e dag	half uur	1 uur	2 uur
2e dag	1 uur	2 uur	4 uur
3e dag	2 uur	2 uur	4 uur
4e dag	2 uur	4 uur	8 uur
5e dag	4 uur	4 uur	hele dag
6e dag	4 uur	8 uur	
7e dag	6 uur	hele dag	
8e dag	8 uur		
9e dag	hele dag		

DRUKPLEKKEN

Controleer uw voeten zodra u deze uit doet op drukplekken. Als er rode drukplekken zijn ontstaan die pas na lange tijd verdwijnen, neem dan contact met ons op.

Heeft u na twee weken geen klachten ondervonden van uw schoenen, dan mag u ervan uitgaan dat ze ingelopen zijn. Het is dan goed voor zowel de voeten als de schoenen om regelmatig af te wisselen met een ander paar schoenen. Drie maanden na uw eerste paar, mag u van de verzekering een tweede- reservepaar orthopedische schoenen.

ONDERHOUD

Goed onderhoud is belangrijk. Kapotte en versleten schoenen hebben namelijk niet meer het corrigerende effect waarvoor ze zijn voorgeschreven. Zorg er daarom voor dat de schoenen:

- regelmatig gepoetst worden, zodat het leer soepel blijft
- niet op de verwarming worden gedroogd
- minstens één keer per maand door u worden gecontroleerd op slijtage.
- tijdig gerepareerd worden bij uw schoenmaker

TIPS EN TRUCS

Van de verzekering mag u drie maanden na aflevering van het eerste paar schoenen een reservepaar aanvragen. Een vervolgpaar is meestal vijftien maanden na aflevering van het eerste paar mogelijk (afhankelijk van uw zorgverzekering). Voor kinderen tot 16 jaar geldt een gebruiksduur van negen maanden. Van deze termijn mag afgeweken worden als de voeten twee maten gegroeid zijn.

Wettelijk is bepaald dat u naast een eventueel eigen risico een eigen bijdrage voor orthopedische schoenen moet betalen van 136.50 euro. Voor kinderen tot 16 jaar is dit 68.50 euro. *(Dit bedrag kan per verzekeringsjaar variëren)*

Bij normaal gebruik van uw schoenen heeft u drie maanden garantie op de pasvorm en zes maanden garantie op slijtage. De garantie vervalt bij reparatie of aanpassing door derden.

Uw orthopedische schoenen geven alleen de beoogde steun als de veters of klittenbandsluitingen stevig gesloten zijn.

MEER WETEN?

Heeft u vragen over (semi) orthopedische schoenen? Bij Leuk Orthopedie helpen wij u graag. U kunt ons hier vinden:

AMERSFOORT

Hoofdvestiging Leuk Orthopedie

Wiekenweg 61

3815 KL Amersfoort

Tel: 085-902 06 90

Spreekuur op afspraak



085-902 06 90



info@leuk-orthopedie.nl



Wiekenweg 61
3815 KL Amersfoort



www.leuk-orthopedie.nl



SEMH
erkend leverancier

Wij zijn maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00
bereikbaar voor al uw vragen.